


Ruftaster

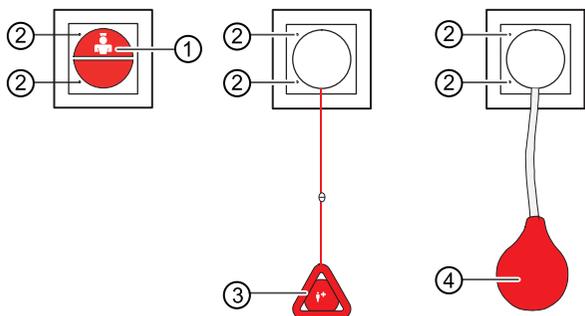

- ① **Rote Ruftaste**
zur Rufauslösung.
- ② **Rotes Findellicht / Beruhigungslicht**
Leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln.
Blinkt hell, wenn ein Ruf ausgelöst wurde.
- ③ **Roter Rufgriff**
zur Rufauslösung durch Ziehen an der Zugschnur.
- ④ **Roter Rufball**
zur Rufauslösung durch Drücken des roten Gummiballs.

Wenn Sie Hilfe benötigen


Alle roten Tasten der Rufanlage dienen zum Auslösen von Rufen.

Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie eine rote Ruftaste (1), ziehen am Rufgriff (3) oder drücken den Rufball (4).

Zur Bestätigung der Rufauslösung leuchtet das rote Beruhigungslicht (2) hell auf.

Das Pflegepersonal meldet sich über Lautsprecher oder kommt zu Ihnen.

Birntaster

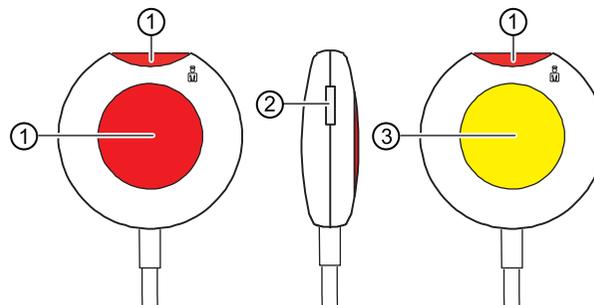


*Birntaster
mit zwei Ruftasten*

*Birntaster
mit Ruf- und Lichttaste*

- ① **Rote Ruftaste**
zur Rufauslösung.
- ② **Findellicht / Beruhigungslicht**
Leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln.
Blinkt hell, wenn ein Ruf ausgelöst wurde.
- ③ **Gelber Lichtschalter**
zum Schalten des Leselichts.

Geräte- und Kabelhalter

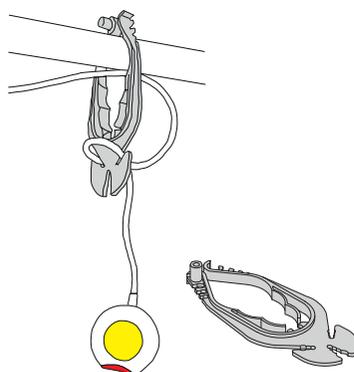

Mithilfe des Geräte- und Kabelhalters lässt sich die Birntaster oder die PBK Hand komfortabel am Bettgagel befestigen.

Bei Zugbelastung öffnet sich der Halter und schützt somit das Gerät vor Zerstörung.





Rufanlage

Zimmer mit Sprechmöglichkeit

Gebrauchsanweisung für Patienten

PBK Hand

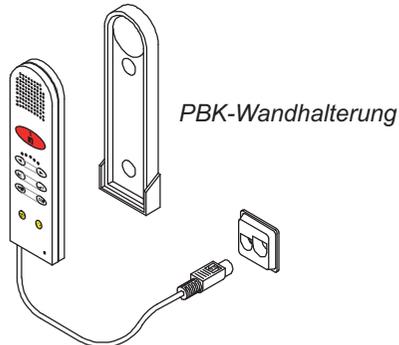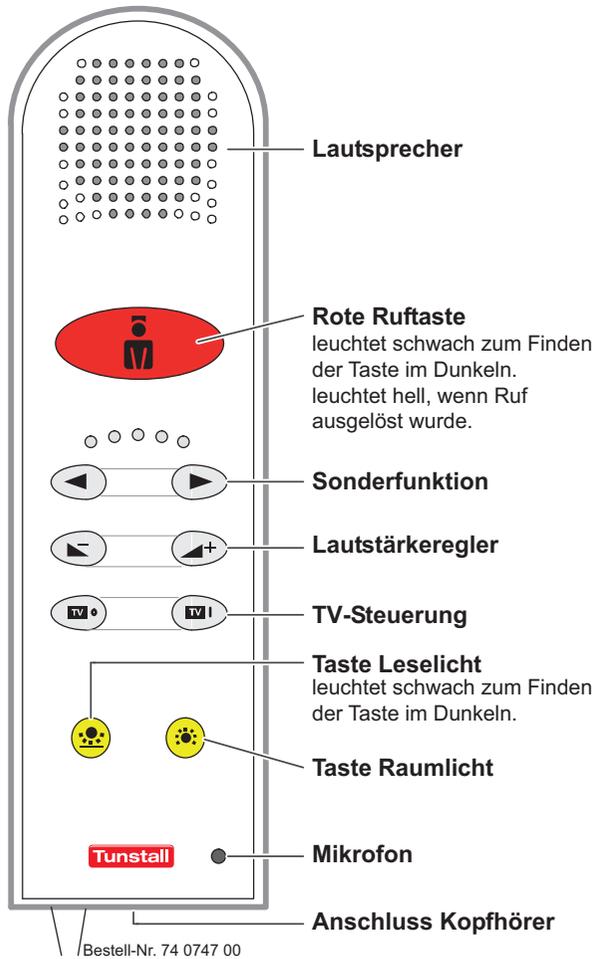

Rufen



Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie die rote Ruftaste.

Pflegepersonal kommt zu Ihnen oder spricht über Lautsprecher. Über das Mikrofon können Sie antworten.

Licht

Licht ein-/ausschalten



Zum Ein- oder Ausschalten Lichttaste kurz drücken.

Licht dimmen

Wenn die Lichtquelle dimmbar ist, können Sie das Licht durch langes Drücken der Lichttaste dimmen.

Mit jedem Tastendruck wechselt das Licht zwischen Aufwärts- und Abwärts-Dimmen.

Licht gedimmt einschalten: Wenn Sie das Licht mit einem kurzen Tastendruck einschalten, wird es mit maximaler Helligkeit eingeschaltet. Sie können das Licht wahlweise mit minimaler Helligkeit einschalten und aufwärts dimmen. Hierzu die Lichttaste beim Einschalten gedrückt halten, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

TV-Steuerung

TV einschalten:



Im TV-Betrieb leuchten die TV-Tasten.

TV-Programm wählen:




TV ausschalten:



Tasten mit Sonderfunktion

Die mit „Sonderfunktion“ bezeichneten Tasten können in jedem Krankenhaus anders benutzt werden, z.B. zur Auswahl eines Hörfunkprogramms oder zur Jalousiesteuerung. Fragen Sie das Pflegepersonal nach der Funktion.

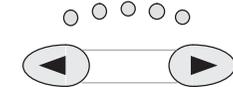


Sonderfunktion Hörfunk

Wenn die Tasten mit Sonderfunktion bei Ihnen für Hörfunk benutzt werden, gehen Sie wie folgt vor:

Hörfunk einschalten: Eine Hörfunk-Taste kurz drücken.

Hörfunk-Programm wählen:

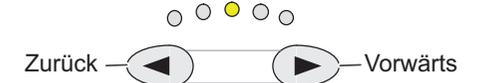


Hörfunk ausschalten: Eine Hörfunk-Taste so oft drücken, bis Hörfunk-Ton aus und LED aus.


Sonderfunktion Jalousiesteuerung

Wenn die Tasten mit Sonderfunktion bei Ihnen zur Jalousiesteuerung benutzt werden, gehen Sie wie folgt vor:

Jalousie abwärts:

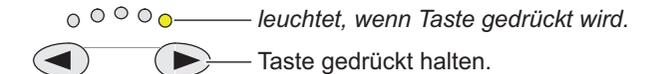

Jalousie aufwärts:

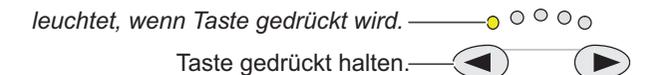

Lautstärke für TV / Hörfunk



Der Ton wird an dem Lautsprecher der PBK Hand übertragen. Alternativ dazu kann ein handelsüblicher Kopfhörer angeschlossen werden. Anschlussbuchse siehe Abbildung der PBK Hand.